

COVID19-Schnelltest (nasal) bei Kita-Kindern

Schritt 1: Vorbereitung

- Hände waschen oder desinfizieren
- Material bereitlegen




Schritt 2: Material vorbereiten

- Testkassette öffnen
- Röhrchen mit Pufferlösung und Spenderkappe bereitlegen
- Tupfer aus Packung nehmen
- Papiertuch bereitlegen


Schritt 3: Nasenabstrich

- Tupfer ca. 1-2cm einführen
- Tupfer 4x drehen (ca. 5 sec.) an der Naseninnenseite
- Im anderen Nasenloch gleich vorgehen

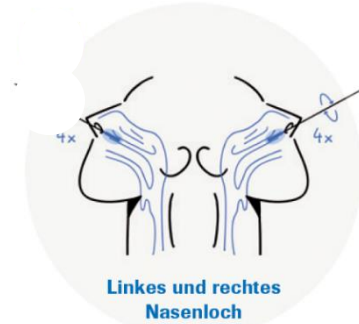


Schritt 4: Tupfer in Röhrchen

- Röhrchen in die andere Hand nehmen und Deckel abnehmen
- Tupfer in die Lösung stecken
- Röhrchen drücken
- Tupfer ca. 10mal drehen
- Tupfer unter Druck entfernen und auf Papiertuch ablegen

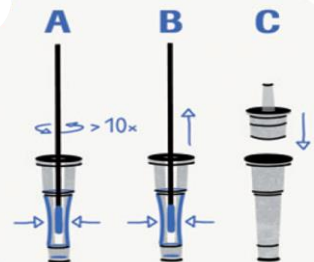


Schritt 5: Tropfen auf Teststreifen geben

- Spenderkappe auf Röhrchen setzen
- 4 Tropfen auf Teststreifen geben, 15 min. warten

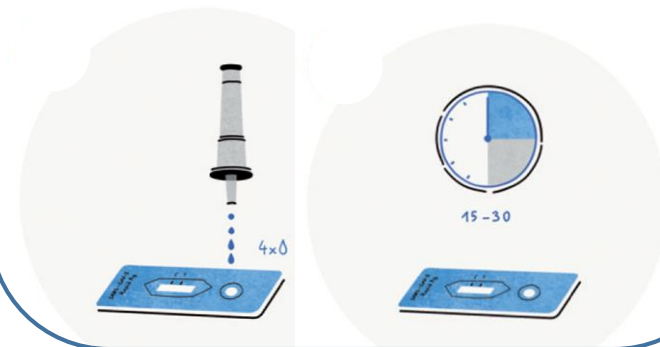

Schritt 6: Ergebnis ablesen

C=Kontrolllinie
T=Testlinie

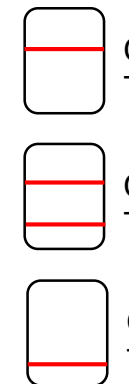

Test ist **negativ** = kein Hinweis auf Infektion mit SARS-CoV2

Test ist **positiv** = Infektion mit SARS-CoV2

Test ist **ungültig** = Wiederholung sofort notwendig

Bitte alle Materialien in die vorbereiteten Mülleimer werfen und anschließend Hände desinfizieren bzw. waschen!