



Anleitung SARS-CoV-2 Schnelltest der Fa. Watmind (sog. Speichel- oder Lollitest) bei Kita-Kindern


Die im Folgenden beschriebenen Schnelltests, die als Selbsttest durchgeführt werden, sollen helfen, Infektionen unter Kindern aus Kindertageseinrichtungen frühzeitig zu erkennen und so Übertragungen in der Einrichtung zu minimieren. Allerdings sind Schnelltests nicht perfekt: nicht alle Infizierten werden damit tatsächlich erkannt. Deshalb müssen zusätzlich auch immer die geltenden Abstands- und Hygieneregeln unbedingt weiter eingehalten werden. Außerdem ist nicht jede Testperson mit positivem Schnelltestergebnis wirklich infiziert. Deswegen muss jeder positive Schnelltest-Befund umgehend mit einem genaueren PCR-Test geprüft werden.

Die Durchführung des Tests wird nach dem Aufstehen, vor dem Essen und Zähneputzen empfohlen. Für den Speicheltest wird ein Abstrich unter der Zunge genommen. Abstrich und Auswertung können durch die Eltern selber nach dieser Anleitung durchgeführt werden. Bitte befolgen Sie dazu die angegebenen Schritte wie beschrieben:

Schritt 1: Vorbereitungen

Führen Sie den Abstrich an einem sauberen Platz durch.

- ✓ Überprüfen Sie die Vollständigkeit des Testkits und legen das Material zurecht (Röhrchen mit Pufferlösung und Kappe, Abstrichtupfer und Testkassette)
- ✓ Öffnen Sie die Verpackung der Testkassette und legen Sie vor sich.
- ✓ Bitten Sie Ihr Kind, **möglichst viel Speichel** im Mund zu sammeln (durch Bewegen von Zunge und Mund)

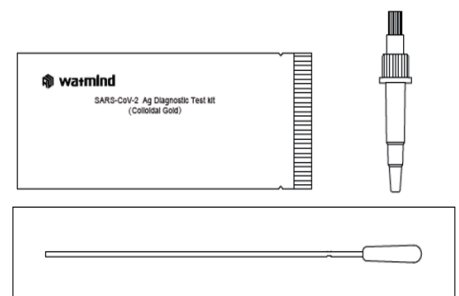




Anleitung SARS-CoV-2 Schnelltest der Fa. Watmind (sog. Speichel- oder Lollitest) bei Kita-Kindern




Schritt 2: Abstrich nehmen

- ✓ Öffnen Sie die Verpackung des Stäbchens mit dem Tupfer an der Griffseite und nehmen ihn aus der Packung, ohne den Tupferkopf zu berühren.
- ✓ Bringen Sie den Tupfer für 10 Sekunden **unter die Zunge** Ihres Kindes und drehen ihn dabei 5 Mal, so dass er vollständig nass ist.

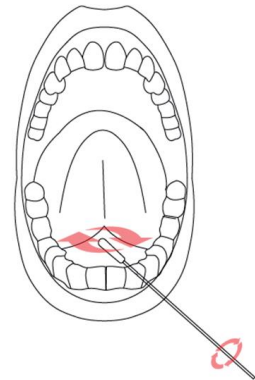

Schritt 3: Probenentnahme

- ✓ Öffnen Sie den unteren (großen) Deckel des Röhrchens, das mit der Pufferlösung gefüllt ist.
- ✓ Führen Sie den Tupfer in das Probenröhrchen und tauchen den Tupferkopf vollständig in die Lösung ein.
- ✓ Mischen Sie die Lösung, indem Sie den Tupfer ca. 10 Mal gegen die Seite des Röhrchens drehen und das Röhrchen 5 Mal von Hand zusammendrücken.
- ✓ Knicken Sie den Tupferkopf ab und belassen Sie ihn in dem Röhrchen.
- ✓ Schließen Sie die untere Abdeckung des Röhrchens und schwenken Sie das Röhrchen 5-6 Mal.

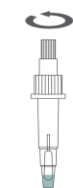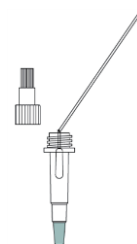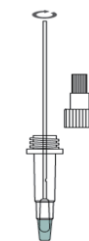





Anleitung SARS-CoV-2 Schnelltest der Fa. Watmind (sog. Speichel- oder Lollitest) bei Kita-Kindern

Schritt 5: Testverfahren

- ✓ Öffnen Sie die obere (kleine) Abdeckung des Röhrchens.
- ✓ Geben Sie **3 Tropfen** der Probe in die Vertiefung auf der Kassette. Schließen Sie den oberen Deckel des Röhrchens.

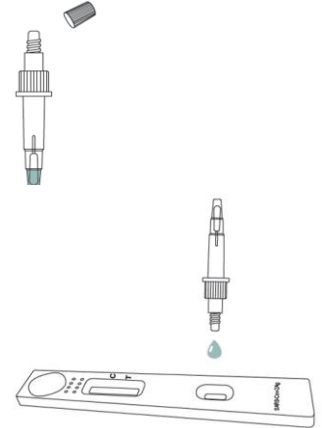

- ✓ Warten Sie 15 Minuten. HINWEIS: Die Kassette darf während dieser Zeit nicht bewegt und/oder berührt werden.

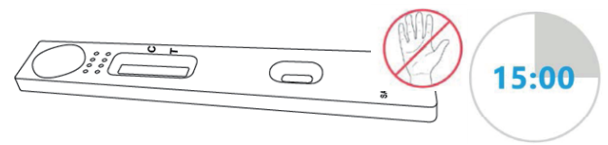


Schritt 6: Ergebnis ablesen

- ✓ Nach 15 bis 20 Minuten kann das Ergebnis direkt abgelesen werden (**C**=Kontrolllinie, **T**=Testlinie).


Strich nur bei C:

- Test ist **negativ**,
- Achtung: Kein sicherer Ausschluss einer Infektion.
- Bei COVID 19 Symptomen ist der Einrichtungsbesuch dennoch untersagt.

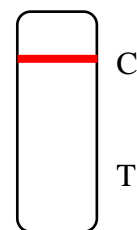

Strich bei C und T:

- Test ist **positiv**,
- weitere Schritte s.u. einleiten

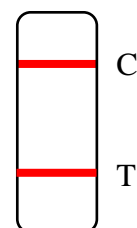




Anleitung SARS-CoV-2 Schnelltest der Fa. Watmind (sog. Speichel- oder Lollitest) bei Kita-Kindern

Strich nur bei T:

- Test ist **ungültig** und muss wiederholt werden

Keine Striche:

- Test ist **ungültig** und muss wiederholt werden

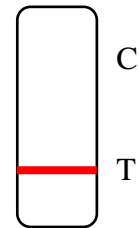

Geben Sie das gesamte Test-Material in eine Plastiktüte, die verschlossen im Restmüll entsorgt wird. Waschen Sie Ihre Hände oder desinfizieren Sie sie, lüften Sie den Raum und reinigen die Unterlage mit einem Desinfektionstuch.

Vorgehen bei positivem Testergebnis:

A) Testung zuhause:

- Die Eltern benachrichtigen umgehend die Kita-Leitung oder die Kindertagespflegestelle. Diese wird weitere Schritte in die Wege leiten (s. Pkt. B).
- Zur Bestätigung des positiven Schnelltest-Ergebnisses ist von den Eltern unverzüglich ein (kostenloser) PCR-Test zu veranlassen.

B) Testung in der Kita:

- Das Kind erhält einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz, wenn dies vom Kind gut toleriert wird. Die Eltern sollen sich bis zum Erhalt des Testergebnisses in räumlicher Nähe zur Kita aufhalten. Für die kurze Zeit, bis die Eltern das Kind abholen, wird das Kind von einem Erzieher oder einer Erzieherin mit FFP2 Maske in Abhängigkeit der Witterung bzw. der örtlichen Gegebenheiten entweder im Freien oder in einem separaten, gut belüfteten Raum betreut. Die Eltern begeben sich mit dem Kind unverzüglich nach Hause. Öffentliche Verkehrsmittel dürfen für die Heimfahrt nicht benutzt werden.
- Es wird dringend empfohlen, dass das betroffene Kind und häusliche Kontaktpersonen in häuslicher Isolation bzw. Quarantäne bleiben bzw. sich auf direktem Weg dorthin begeben.



Anleitung SARS-CoV-2 Schnelltest der Fa. Watmind (sog. Speichel- oder Lollitest) bei Kita-Kindern

- Die Kita-Leitung erstellt eine Testbescheinigung und sendet sie umgehend an das Gesundheitsamt der LHS Stuttgart (per Fax: **0711 216 9510328**). Die Testbescheinigung ist zu finden unter: <https://coronavirus.stuttgart.de/item/show/708670/>. Die Eltern erhalten eine Kopie der Testbescheinigung.
- Zur Bestätigung des positiven Schnelltest-Ergebnisses ist von den Eltern unverzüglich ein (kostenloser) PCR-Test zu veranlassen.

Wo kann der PCR-Test durchgeführt werden?

Zur Durchführung des PCR-Tests wenden Sie sich entweder an Ihren Kinder- und Jugendarzt oder an eine Corona-Schwerpunktpraxis (<https://www.kvbawue.de/index.php?id=1102>). Sie können auch einen Termin im Testzentrum Cannstatter Wasen vereinbaren (<https://corona-testzentrum-wasen.de/>) unter Angabe von „PCR-Test bei positivem Antigen-Schnelltest“, in der Fieberambulanz in der Schwerpunktpraxis Dr. Roll und Kollegen, Schwabstraße 26, 70197 Stuttgart (<https://www.fieberambulanz-stuttgart.de/home.html>) oder sich ohne Termin in der Fieberambulanz des Klinikums Stuttgart, Kriegsbergstr. 60, 70174 Stuttgart, vorstellen (<https://www.klinikum-stuttgart.de/aktuell-im-klinikum/presse/infoseite-corona-virus/fieber-ambulanz>).

Ein **negativer PCR-Test** hebt den positiven Schnelltest auf. Bei einem **positiven PCR-Test** veranlasst das Gesundheitsamt die entsprechenden Absonderungsmaßnahmen.