


Kurzanleitung COVID19-Schnelltest („Lolli-Test“)

Schritt 1: Vorbereitung

- Test **vor dem Essen und Zähneputzen** durchführen
- Hände waschen
- Material bereitlegen

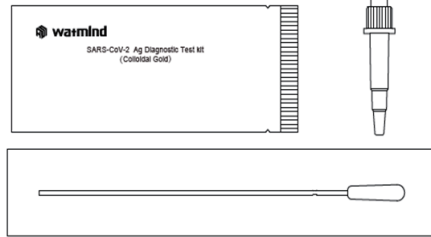


Schritt 2: Material bereitstellen

- Testkassette aus Hülle nehmen
- Röhrchen mit Pufferlösung und Spenderkappe bereitlegen
- Tupfer aus Packung nehmen
- **Speichel sammeln** (Zunge im Mund bewegen)


Schritt 3: Abstrich unter Zunge nehmen

- Tupfer unter die Zunge bringen
- Tupfer 5x (ca. 10 sec.) drehen, bis er vollständig nass ist

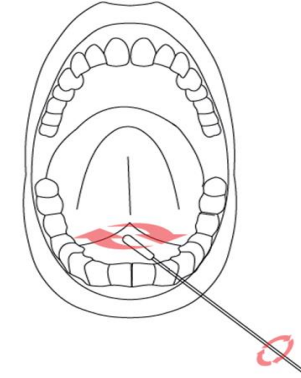

Schritt 4: Tupfer in Röhrchen

- Unteren (großen) Deckel des Röhrchens aufdrehen
- Tupfer in die Lösung eintauchen
- Tupfer ca. 10mal gegen die Seite des Röhrchens drehen
- Röhrchen 5 Mal zusammendrücken
- **Tupferkopf abknicken** und im Röhrchen belassen
- Deckel zudrehen

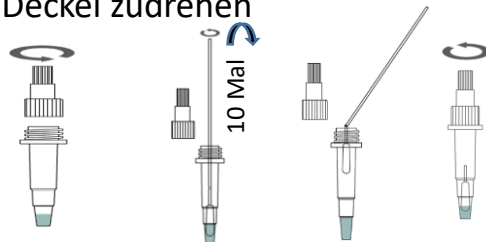


Schritt 5: Tropfen auf Teststreifen geben

- Röhrchen 5-6 Mal schwenken
- Obere (kleine) Abdeckung des Röhrchens öffnen
- **3 Tropfen** in Vertiefung der Kassette geben
- **15 min.** warten, Kassette nicht mehr bewegen



Schritt 6: Ergebnis ablesen


C=Kontrolllinie
T=Testlinie

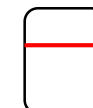

C

T

Test ist **negativ** = kein Hinweis auf Infektion mit SARS-CoV2

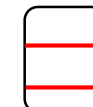

C

T

Test ist **positiv** = Infektion mit SARS-CoV2



C

T

Test ist **ungültig** = **Wiederholung** sofort notwendig

Bitte alle Materialien in den Mülleimer werfen und anschließend Hände desinfizieren bzw. waschen!